

Gants latex sans poudre, coloris naturel, par 100 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE



AQL
1.5



MD

CE
CAT
III

Utilisation : Parfaitement adaptés à des tâches de nettoyage courtes, à la manipulation de tous type d'aliments ainsi qu'aux tâches comportant un risque de contact avec des fluides corporels.



Description produit :

Marque Abena

Gamme *Classic*

Non poudré

Non stérile

Coloris : naturel 

Extrémités des doigts texturées

Bords roulés

Manipulation des aliments

Contient du latex

Longueur de la manchette : 240 MM

Spécificités :

Classe CE : class I

Marquage CE : Cat III

AQL : 1,5

Importation : Abena A/S, Danemark

Fabrication : Thaïlande

Conforme aux règlementations :

MDR (EU) 2017/745,
425/2016/EU

Normes :

EN 455-1, 2, 3 et 4
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN 16523-1:2015+A1:2018
EN 374-4:2019
EN 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 21420:2020

Durée de conservation

Stockage : 10-30°C.
Éviter la chaleur,
l'humidité, la lumière
directe du soleil et
l'ozone.

A conserver 3 ans à
partir de la date de
production.

Gants latex sans poudre, coloris naturel, par 100 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE

Comparatif des tailles :

Référence	Tailles		Largeur (mm)	Epaisseur (+/-5)	
				doigts	paume
881799	XS	5-6	75	0,11 mm +/- 0,02	0,10 mm +/- 0,02
438799	S	6-7	85		
438899	M	7-8	95		
438999	L	8-9	105		
438199	XL	9-10	115		

Données logistiques :

Référence	Pièces Par boîte	Pièces par carton	Pièces par palette	Cartons par palette	Poids carton (brut)
881799	100	1000	45 000	45	3,50 kg
438799	100	1000	45 000	45	4,50 kg
438899	100	1000	45 000	45	5,00 kg
438999	100	1000	45 000	45	5,50 kg
438199	100	1000	45 000	45	6,20 kg

Visuels des boîtes :



XS - 881799



S - 438799



M - 438899



L - 438999



XL - 438199



Gants latex sans poudre, coloris naturel, par 100 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE

Composition du gant :

Produit Chimique	Numéro CAS
Natural Rubber Latex	9010-81-5
Sulphur	7704-34-9
Zinc Oxide	1314-13-2
Dithiocarbamate	14324-55-1, 136-23-2
Calcium carbonate	1317-65-3
Titanium Dioxide	13463-67-7
Potassium Hydroxide	1310-58-3
Polymeric Sterically Hindered Phenol	68610-51-5

Test de perméation aux produits chimiques :

Produit Chimique	Numéro CAS	Temps de pénétration	Niveau
Acetic acid 10%	64-19-7	47 min.	2
Acetic acid 99%	64-19-7	4-7 min.	0
Acetone	67-64-1	<1 min.	0
Acetonitrile	75-05-8	<1 min.	0
Ammonium hydroxide 25%	1336-21-6	5 min.	0
Carbon disulphide	75-15-0	<1 min.	0
Dichloromethane	75-09-2	<1 min.	0
Chlorhexidine Digluconate 20%	18472-51-0	>480 min.	6
Diethylamine	109-89-7	<1 min.	0
Ethyl acetate	141-78-6	<1 min.	0
Ethidium bromide 1,5%	1239-45-8	>480 min.	6
Formaldehyde 15%	50-00-0	>480 min.	6
Formaldehyde 37%	50-00-0	361-480 min.	5
Hydrochloric acid 10%	7647-01-0	>480 min.	6
Hydrochloric acid 36%	7647-01-0	46 min.	2
Hydrogen Peroxide 30%	7722-84-1	>480 min.	6
Methanol	67-56-1	<1 min.	0
N-heptane	142-82-5	<1 min.	0
Nitric acid 10%	7697-37-2	>480 min.	6
Nitric acid 65%	7697-37-2	29 min.	1
Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min.	6
Sulphuric acid 96%	7664-93-9	27 min.	1
Toluene	108-88-3	<1 min.	0

Test Method used EN ISO 16523-1:2015

Gants latex sans poudre, coloris naturel, par 100 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE

Produits complémentaires :

Support mural gants



Support mural gants



- **Pratique** : à visser au mur ou à coller grâce à une bande adhésive.
- **Adaptable** : bras flexibles s'adaptant à toutes les tailles de boîtes et garantissant le maintien parfait de la boîte sur le support.
- **Hygiénique** : armature en acier inoxydable qui peut être désinfectée ou passer à l'autoclave.
- **Multi-usage** : support compatible avec toutes les boîtes de gants ABENA ainsi que les boîtes à mouchoirs (réf 6210) ou les boîtes à tabliers (réf 108059).

Référence	Nombre de boîte(s)	Couleur	Dimensions	Unités par carton	Carton par palette
490251	1 boîte	Argent	197 x 260 mm	45	16
490253	3 boîtes		630 x 260 mm	10	16