


Brassière de sécurité pour fauteuil ou lit

Brassière de sécurité : assure le maintien et l'immobilisation des patients en fauteuil roulant ou au lit, évite le basculement en avant.

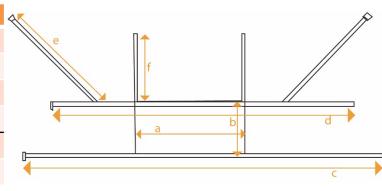

Brassière de sécurité pour fauteuil ou lit							
		<u>Dimensions (en cm)*</u>					
	Taille	a	b	С	d	e	f
07.1500	Junior	30	15	165	145	30	30
07.1510	Adulte	36	20	180	160	40	30
07.1520	Junior	30	15	240	130	45	20
07.1530	Adulte	36	20	260	145	50	20



Conseils d'installation

- 1. Positionner le plastron sur le torse sur patient
- 2. Régler les bretelles selon la morphologie du patient
- Fixer les sangles à l'arrière du fauteuil ou du lit

<u>Limites d'utilisation</u>: Ne convient pas aux personnes très agitées. N'empêche pas le glissement. Pour tout type de fauteuil sauf fauteuil de type coquille

Composition:

Tissu molleton: 100% Coton sur enduction de Polychlorure de Vinyle

Sangles: 100% Polypropylène

Boucles: 100% Acétal

Entretien:





Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

Garantie: Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.



^{*} Dimensions données à titre indicatif