

HEXANIOS G+R

Détergent
Pré-désinfectant
de l'instrumentation

PRODUIT
A DILUER
25 ml > 5L




0,5%
15 min.



INDICATIONS

- Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.
- Ramassage de l'instrumentation souillée.


PROTOCOLE D'UTILISATION ENDOSCOPIE

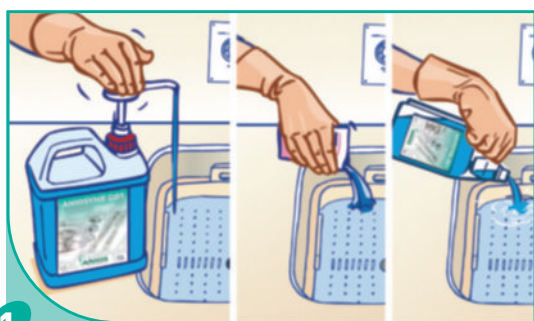

1

Dilution 0,5 % : Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.


10 min.

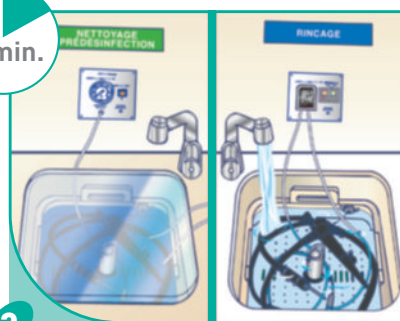

2

Premier nettoyage : Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage minimum : **10 minutes**. Brosser si nécessaire. Irriguer les canaux et rincer soigneusement à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique), l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.

5 min.

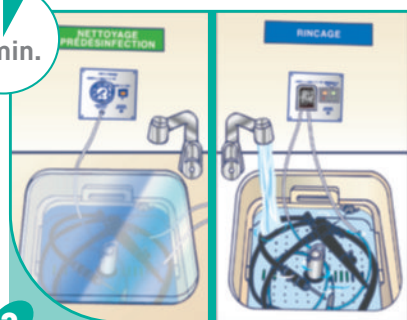

2

Second nettoyage : Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage minimum : **5 minutes**. Irriguer et rincer soigneusement à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique), l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.

- **Matériel thermosensible :**
Passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)
- **Matériel autoclavable :**
Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement).

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Le statut réglementaire des produits (dispositif médical ou produit biocide) est précisé sur l'étiquette