



SANGLE CLAVICULAIRE "SHOULD CLASSIC"

Fonctions

Mise en rétropulsion des épaules

Indications et usages


Utilisation pré-opératoire

Fractures de la clavicule (sans atteinte ligamentaire ou articulaire)

Précautions

Dispositif médical de classe I. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur. Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit. Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle. Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence. Veiller à ce que le coussin rond soit bien centré, pour cela, utiliser les auto-agrippants mâles des sangles, alternativement, jusqu'à trouver un réglage rigoureux et confortable.

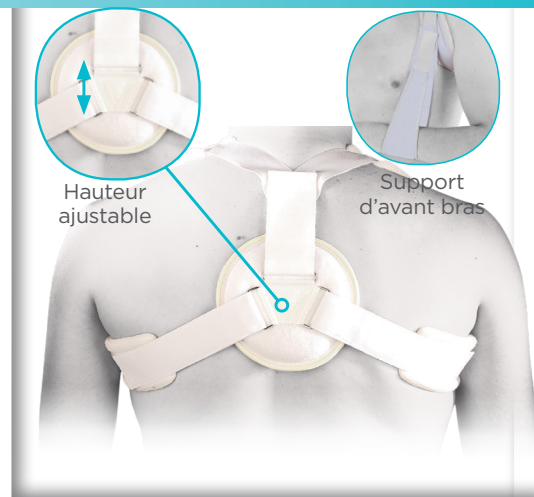

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière. Entretien des éléments textiles :



Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Caractéristiques

Bandage claviculaire classique composé d'un tissu interne en bouclette coton / Capiton dorsal renforcé pour un confort optimal / Deux sangles d'épaule capitonnées recouvertes de jersey tubulaire coton / Ancre arrière réglable en hauteur (de la taille S à XL) / Fermeture par système auto-agrippant / Bordure de coloris différents selon les tailles

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.
Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.


1. Placer le bandage dans le dos en positionnant le coussin au niveau des omoplates, sangles orientées vers le haut,
2. Passer les sangles sur les épaules puis sous les bras du patient en s'assurant que les capitons des deux sangles protègent bien le patient au niveau des aisselles,
3. Insérer l'extrémité des sangles dans les deux boucles inférieures du coussin et effectuer le réglage des sangles simultanément afin que le bandage soit bien positionné avant la fermeture,
4. ATTENTION : le coussin doit être centré. Il peut être ajusté en hauteur par l'accroche velcro supérieure.
5. Utiliser l'écharpe de soutien du bras selon l'avis du médecin. Fixer la bandes auto-agrippante du support d'avant bras sur les bandes auto-agrippante du capiton de l'épaule à soulager.

Composition

Polyéther sulfone, Coton, Polyamide, Polyester, PVC

Tableau des tailles :

Taille	Largeur d'épaule	Code ACL	Coloris	Coloris bordure
XXS (0-6 mois)	-	34010 7377624 8	Blanc	Rose
XS (6-24 mois)	< 25cm	34010 7377630 9		Lavande
XS (2-6 ans)	< 33cm	34010 7377647 7		Blanc
S (6-13 ans)	< 36cm	34010 7377676 7		Bleu cyan
S (Ado/Femme)	< 40cm	34010 7970486 3		Vert
M	< 49cm	34010 7377653 8		Orange
L	< 57cm	34010 7377682 8		Jaune
XL	≤ 65cm	34010 7377699 6		Vert foncé

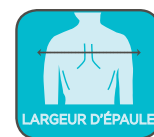

Groupe SOBER SAS - www.sober.fr

Siège Social : 391 rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest - 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS - France
Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupesoberetvous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : août-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016