

STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG - STERANIOS 2% ECS

Désinfectant
de haut niveau


PRODUIT
PRÊT À L'EMPLOI



INDICATIONS

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

PROTOCOLE D'UTILISATION

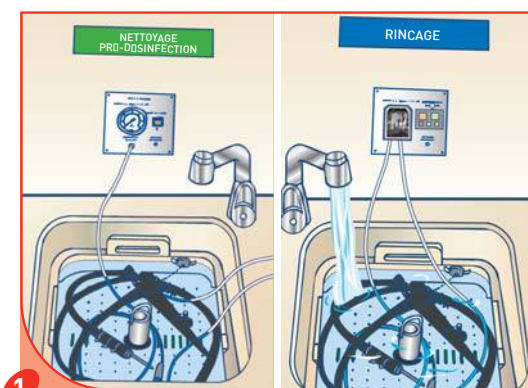

1
Etape de pré-désinfection : Nettoyer le dispositif médical avec un produit type ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R, ou ANIOSYME PLA II. Rincer soigneusement sous eau courante (Changer l'eau de rinçage après chaque utilisation).



2
Etape de désinfection : Verser la solution. Couvrir le bac.
Temps de contact : 10 min. ou 1 heure selon l'activité recherchée.
Temps de conservation du bain de trempage : 7 jours.



3
Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2 µm). Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.



4
Essuyer avec un champ d'usage unique. Conserver les dispositifs médicaux le plus aseptiquement possible.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Le statut réglementaire des produits (dispositif médical ou produit biocide) est précisé sur l'étiquette. Le statut réglementaire des produits (dispositif médical ou produit biocide) est précisé sur l'étiquette.