

# H2



**CE** Mention réglementaire (RDM 2017/745) : « ... tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel [...] le patient est établi. »

Service consommateurs. Si vous avez des questions ou remarques sur votre produit, consulter votre revendeur ou envoyer un email à : [info@graphite-medical.com](mailto:info@graphite-medical.com)

**GRAPHITE MEDICAL**  
53 rue Reine Lacour, ZAC Europarc  
71850 Charnay-lès-Mâcon (France)  
Tél. : +33 (0)4 74 60 46 39


[www.graphite-medical.com](http://www.graphite-medical.com)

**GRAPHITE**  
MEDICAL

# H2

## BANDAGE D'ÉPAULE H2 SEMI-AÉRÉ.

Version standard-Références : H2 XS à H2 XXL  
Version universelle-Références : H2 UE et H2 UA

Dispositif médical de classe I,  pour patient unique - à usages multiples.  
Au moins la première installation doit être effectuée par un professionnel de la santé qualifié.  
Pour les enfants, les installations ultérieures doivent être effectuées par un adulte.  
Durée et modalités d'utilisation sous contrôle de votre prescripteur.  
Utilisation prévue et groupe cible de patients :  
H2 est un bandage d'immobilisation d'épaule pour adultes et enfants selon les tailles disponibles.

RÉF.	GTIN	MESURE
H2 XS (enfant 2 à 5 ans)	3615650002617	< 70 cm
H2 S	3615650002570	< 85 cm
H2 M	3615650002563	< 115 cm
H2 L	3615650001887	< 125 cm
H2 XL	3615650002600	< 145 cm
H2 XXL	3615650002624	< 165 cm
H2 UE (Universel Enfant)	3615650002594	80 à 100 cm
H2 UA (Universel Adulte)	3615650002587	100 à 140 cm



Tour de poitrine  
AVEC un bras  
Plaquer un bras contre le corps.  
Mesurer le tour de poitrine AVEC  
le bras à immobiliser.



**GRAPHITE**  
MEDICAL

Indications :

- Maintien post-traumatique de l'épaule et du coude.
- Luxations, entorses, lésions tendineuses de l'épaule.
- Fractures (tête humérale, omoplate, clavicule).
- Utilisation pré ou postopératoire.

⚠ Contre-indications et précautions d'emploi :

- S'assurer auprès de votre médecin que maladies cutanées, troubles de la circulation (lymphatique / sanguine) ou troubles de la sensation ne soient pas incompatibles avec le port de l'orthèse.
- Toute modification inadéquate apportée au produit et/ou utilisation non destinée à l'usage prévu excluent la responsabilité du fabricant.
- Vérifier le bon état apparent du produit et de son emballage avant utilisation.
- Ne pas appliquer sur plaie non protégée.
- Veiller à utiliser la taille adéquate.
- Veiller à bien verrouiller les fermetures auto-agrippantes.
- Veiller à ne pas trop serrer les sangles.
- Eviter l'application de corps gras (crèmes, pommades).

Actions :

- Bandage à visée antalgique.
- Décharge l'épaule en soutenant le bras (manchon).
- Limite les mouvements de rotation et d'abduction.

- En cas de signes d'allergie cutanée, de douleurs ou de gêne inhabituelle, demander un avis médical.
- Ne pas exposer à toute source de chaleur susceptible de provoquer l'inflammation du dispositif (flamme, surface chaude ...).
- Ne pas conduire avec ce bandage.

EFFETS INDESIRABLES :

En cas de fracture de l'humérus :

- Nécrose avasculaire, instabilité, absence de soudure, raideur, déchirure, douleur, chirurgie ou thérapie secondaire.

En cas de fracture de la clavicule :

- Absence de soudure, dysesthésie autour et sous le site de la fracture.

Description :

- Bandage d'immobilisation d'épaule semi aéré.
- Comprend un support de bras manchon partiellement ajouré, prolongé par deux bretelles d'épaule.
- Blocage par sangle humérale affinée pour réduire l'effet de chaleur.
- Bandage à porter sur un vêtement.
- Tissu principal en mousse de confort, extérieur maille grattée, intérieur bouclette coton.
- Paroi arrière du manchon en filet aéré.
- Biais doux.
- Modèle bilatéral.
- Fermeture par contact renforcée.

Entretien et stockage :

🧼 Lavage à la main, eau tiède (30°C) et savon neutre SANS eau de javel.  
⚠ Ne pas blanchir. ⚠ Ne pas nettoyer à sec. Essorage par pression sans tordre le produit. ⚠ Ne pas sécher au sèche-linge. Séchage à l'air ambiant SANS soleil, ou autre source de chaleur. ⚠ Ne pas repasser.  
Stocker dans un environnement propre, à l'abri de l'humidité ☔, à température ambiante et à l'abri de la lumière ☀.

Réutilisation et mise au rebut :

- Ce produit est adapté à votre traitement. Ne pas le réutiliser sans avis médical. Ne pas le transmettre à une tierce personne.

♻ Mise au rebut selon les dispositions légales en vigueur dans votre pays.

Composition et numéro de lot :

- Voir étiquette sur le produit.



Paroi arrière du manchon, contre le buste, en filet aéré.



Affiné dans le dos pour moins de chaleur.

Application :

- Placer l'avant-bras dans le manchon (1).
- Passer les bretelles sur les épaules puis les croiser dans le dos (2).
- Fermer les bretelles **sur l'avant du manchon** en passant sous l'avant-bras.
- Accrocher la sangle humérale (3) sur l'avant du manchon.
- Faire le tour du buste en passant sur le bras et fermer la sangle sur elle-même.
- Version universelle : longueur de la sangle humérale ajustable (4).



Existe en version universelle avec ajustement de la sangle humérale.