

Pour vous accompagner

UN SITE INTERNET DÉDIÉ

Découvrez tous nos conseils santé pour vos jambes sur le site www.sigvaris.com

Grâce aux vidéos et aux articles, retrouvez également des informations médicales qui vous permettront de mieux comprendre la maladie veineuse et de découvrir des solutions de compression efficaces et innovantes.



Suivez-nous également sur  

SERVICE CONSOMMATEURS

Appelez-nous au :



0 969 320 966

Service gratuit
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h



Écrivez-nous à :

services.consommateurs@sigvaris.com

Nos recommandations

- ▶ Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.
- ▶ Lavez les produits avant la première utilisation.
- ▶ Les produits Expert, 503 et 504 doivent être enfilés de préférence dès le matin sur une peau propre et sèche.
- ▶ Les produits Anti-thrombose doivent être portés de jour comme de nuit dans le cadre de la prévention de la thrombose veineuse profonde.
- ▶ N'utilisez pas les produits sur une peau lésée.

POUR ENFILER VOTRE PRODUIT



Retrouvez notre technique d'enfilage en vidéo, dans notre rubrique Coaching santé sur www.sigvaris.com

LES TRUCS EN +

PENSEZ-Y ! Massez vos jambes de bas en haut, afin de bien répartir le textile et favoriser le retour veineux. Bien en place, votre produit est plus efficace !

ROLLY, une solution unique d'aide à l'enfilage et au retrait des produits. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Retrouvez la présentation du produit Rolly en vidéo sur notre site www.sigvaris.com



POUR ENTREtenir VOTRE PRODUIT



Lavez en machine, programme délicat à 30°C.



N'utilisez pas d'assouplissant.



Séchez loin de toute source de chaleur.

- ▶ Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage.

Indications

▶ ANTI-THROMBOSE

Bas de compression médicale entre 15,1 et 20 mmHg (entre 20,1 et 27 hPa, classe II)

- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).

▶ EXPERT / 503

Bas de compression médicale entre 20,1 et 36 mmHg (entre 27,1 et 48 hPa, classe III)

- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Œdème veineux chronique (C3).
- Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).
- Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).

- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

▶ 504

Bas de compression médicale supérieure à 36 mmHg (au-dessus de 48 hPa, classe IV)

- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de l'ulcère actif (C6) jusqu'à cicatrisation complète.
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Contre-indications

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

Précautions d'emploi

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.

En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

sigvaris



*Notice d'utilisation incluse

Guide pratique
de la compression*

Un savoir-faire reconnu

Au sein de SIGVARIS GROUP nous pensons qu'il est fondamental d'avoir le bon partenaire santé à ses côtés. C'est pourquoi nous nous employons à proposer un ensemble de solutions complémentaires, couvrant toutes les exigences en matière de compression.

Nos offres reposent sur des marques répondant à des besoins distincts et à des pathologies différentes (insuffisance veineuse chronique, lymphœdème, thrombose veineuse profonde), et capitalisent sur nos 150 ans d'expertise médicale. Chacune de nos marques a été soigneusement conçue pour proposer la meilleure solution aux femmes et aux hommes porteurs de compression.

Engagés dans le développement de réponses médicales pertinentes, nous innovons sans cesse pour améliorer la qualité de vie des personnes, chaque jour.

CONCEPTION,
FABRICATION,
COMMERCIALISATION :
DU 100 % FRANÇAIS !



Les atouts de la gamme sigvaris

► Efficace :

- Pression dégressive tout au long de la jambe.
- Taillage adapté à toutes les morphologies.

► Confortable et facile à enfiler :

- Forme anatomique intégrée dès la conception du produit.
- Bande auto-fixante qui présente une bonne tolérance cutanée.



*Brevetée : concerne la France uniquement.

► Qualité Premium :

- Produits fabriqués en France.
- Exigence dans la sélection des fibres.

► Un large choix de produits pour chaque situation de vie.

La compression comment ça marche ?

La compression médicale est le traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques⁽¹⁾. Les produits de compression médicale (chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.

► Les conditions d'utilisation et de renouvellement sont à demander à votre prescripteur (médecin, infirmier etc...).

EXPERT

- EXPERT est une offre de classe 3 adaptée aux pathologies les plus sévères.
- Bande auto-fixante qui respecte les peaux sensibles⁽²⁾.
- Facilité d'enfilage : une construction brevetée.



La construction et la forme spécifique du produit (talon, mollet et haut de cuisse adaptés) assurent la facilité d'enfilage tout en garantissant une forte compression.

LES MODÈLES



Chaussettes*



Bas auto-fixants*

COMPOSITIONS

Chaussettes :
58 % Polyamide ; 42 % Elasthanne
Bas auto-fixants :
51 % Polyamide ; 49 % Elasthanne, présence de silicone au niveau de la bande auto-fixante

*Existe en pieds ouverts pour les modèles HOMME

503-504

- Produit conçu pour répondre spécifiquement au traitement des stades avancés de la maladie veineuse.
- Textile composé de gomme naturelle et de polyamide.

LES MODÈLES



Chaussettes



Bas cuisse



Collant**



Hémicollant gauche***



Hémicollant droit***

COMPOSITIONS

Chaussettes / Bas cuisse 504 / Hémicollant : 65 % Polyamide ; 35 % Elastodiène
Bas cuisse 503 : 55 % Polyamide ; 35 % Elastodiène ; 10 % Autres fibres
Collant 503 : 65 % Polyamide ; 27 % Elastodiène ; 1 % Elasthanne ; 7 % Autres fibres

**Existe uniquement pour le modèle 503 HOMME
*** Existe uniquement pour le modèle 503

ANTI-THROMBOSE

Les chaussettes et bas anti-thrombose sont indiqués dans la prévention de la thrombose veineuse profonde, dans un contexte médical ou chirurgical. Ils peuvent être portés dans le cadre de l'utilisation d'un bistouri électrique conformément au respect de la notice du fabricant de ce dernier⁽³⁾.

► Confort

- Bande auto-fixante qui respecte les peaux sensibles⁽²⁾.
- Pied ouvert et revers optimisés.
- Construction spécifique qui favorise le confort en position allongée.

► Douceur⁽⁴⁾

Texture douce pour un contact agréable avec la peau.

LES MODÈLES



Chaussettes



Bas auto-fixants

COMPOSITIONS

Chaussettes : 67% Polyamide ; 33% Elasthanne
Bas auto-fixants : 66% Polyamide ; 34% Elasthanne, présence de silicone au niveau de la bande auto-fixante

Les produits de compression médicale Sigvaris et Rolly sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé.

(1) HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010. (2) Bonne tolérance cutanée chez 90% des volontaires - Etudes CERT, CHU Saint-Jacques de Besançon auprès de 30 personnes - 2008. (3) Eloignement du bas du minimum 10 cm par rapport au bistouri, pour ne pas risquer d'inflammation du bas au contact de l'électrode du bistouri - Isolation du patient au regard de la table opératoire par des procédés classiques (le bas ne constitue pas lui-même un isolant et ne doit donc pas être utilisé à cette fin) - En utilisation monopolaire du bistouri, l'électrode neutre ne doit pas toucher le bas. Produit testé selon la norme EN 1149-2 (détermination de la résistance électrique verticale). (4) Douceur : étude interne réalisée sur 13 personnes - 2019.

SIGVARIS
GROUP

Sigvaris, Expert and Rolly are registered trademarks of SIGVARIS AG, St. Gallen / Switzerland, in many countries worldwide. © Copyright 2020, by SIGVARIS - St-Just St-Rambert, France. Fabricant : SIGVARIS - ZI Sud d'Andrézieux - rue B. Thimonnier 42170 St-Just St-Rambert



Produit fabriqué sous Système de Management de la Qualité certifié AFAQ ISO 9001

