

**Classe II, pression 15, 1 à 20 mmHg ou 20, 1 à 27 hPa**

Disponibles en format chaussettes et bas autofixant ( concerne les gammes Legger Homme Chic Tech et Legger Casual Coton).

**PRINCIPALES MATIERES :**

- Polyamide, Coton d’Egypte (dont fil d’écosse), Elasthane (Legger Homme Chic Coton).
- Polyamide, Elasthane, Silicone\*(Legger Homme Chic Tech).
- Polyamide dont polyamide microfibrilles, Coton d’Egypte, Elasthane, Silicone\* (Legger Homme Casual Coton).
- Polyamide Elasthane (Legger Homme Casual tech).
- Polyamide, Elasthane, Tencel (Legger Homme Casual T-fibre, Legger Homme Sportwear T-fibre).

\*Uniquement pour le format bas autofixant.

**MODE D’ACTION :** La compression veineuse élastique exerce une pression décroissante de la cheville vers le haut de la jambe, elle permet d’améliorer le retour vers le cœur.

**INDICATIONS**

- Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise ou en station debout prolongée.
- Varicosités, varices.
- Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l’avis de votre médecin.

**CONTRE-INDICATIONS**

- Intolérance / Réaction allergique au produit.
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.

**PRECAUTIONS D’EMPLOI**

- Laver le produit avant la première utilisation.
- En cas d’AOMI avec IPS >0,6 et <0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d’abord soigner l’infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d’œdème, ... ), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.
- En cas de superposition de produits de format chaussettes / mi-bas, veiller à ne pas positionner les bords côtes l’un sur l’autre.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

- Réactions cutanées (éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations, ampoules au niveau de la bande autofix des bas).
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l’objet d’une notification aux Laboratoires Innothéra et à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
- **Site internet :** [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr).

**CONSEILS D’ENFILAGE**



**CONSEILS D’ENTRETIEN**

**Lavage :** A la main ou en machine à 30°C, sans adoucissant ni agent de blanchiment.

**Essorage :** Sans tordre.

**Séchage :** A plat, à l’abri de toute source de chaleur, ne pas repasser.



# LEGER HOMME CASUAL COTON CLASSE III

**Classe III, pression 20,1 à 36 mmHg, ou 27, 1 à 48 hPa**

Disponible en format chaussettes et bas autofixant.

## PRINCIPALES MATIERES :

- **Polyamide dont polyamide microfibres, Coton d’Egypte, Elasthane, Silicone** (Uniquement pour le format bas autofixant).

**MODE D’ACTION :** La compression veineuse élastique exerce une pression décroissante de la cheville vers le haut de la jambe, elle permet d’améliorer le retour vers le cœur.

## INDICATIONS

- Jambes lourdes ou douloureuses.
- Varices importantes.
- Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- OEdème veineux chronique.
- Insuffisance veineuse chronique avec troubles trophiques.
- Ulcère veineux cicatrisé.
- Thrombose veineuse superficielle ou profonde (TVS ou TVP), avec traitement anticoagulant (sauf si contre-indication).
- Complications de la TVP proximale (syndrome post-thrombotique) : prévention (6 mois à 2 ans) ou traitement des séquelles.
- Lymphoedème en phase de maintien.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l’avis de votre médecin.

## CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance / Réaction allergique au produit.
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.

## PRECAUTIONS D’EMPLOI

- Laver le produit avant la première utilisation.
- En cas d’AOMI avec IPS >0,6 et <0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d’abord soigner l’infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (prise/perte de poids, résorption d’œdème, ... ), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.
- En cas de superposition de produits de format chaussettes / mi-bas, veiller à ne pas positionner les bords côtes l’un sur l’autre.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Réactions cutanées (éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations, ampoules au niveau de la bande autofix des bas).
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l’objet d’une notification aux Laboratoires Innothéra et à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
- **Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr).**

## CONSEILS D’ENFILAGE



## CONSEILS D’ENTRETIEN

**Lavage :** A la main ou en machine à 30°C, sans adoucissant ni agent de blanchiment.

**Essorage :** Sans tordre.

**Séchage :** A plat, à l’abri de toute source de chaleur, ne pas repasser.

